

Active³
Erection System

Medintim

Vacuum Therapy for Erectile Dysfunction (ED)

Vákuumterápiás készülék merevedési zavar kezelésére



Active³
Erection System

Medintim



Attach the ring loaders and the cone

Csatlakoztassa a szorítógyűrű töltőt és a kúpot. (Szürke gyűrűt, majd a hegyet)



Slide a constriction ring using the cone

Csúsztassa a leszorítógumit a kúpra, majd onnan a gyűrűre.



Alternative: stretch the constriction ring by hand

Az előbbi lépést helyettesítheti erővel: egyszerűen húzza szét a gumigyűrűt és úgy illessze a helyére.

Active³
Erection System

Medintim



Ready to use

Az ábra a használatra kész állapotot mutatja

Active³
Erection System

Medintim

Application on the body

A készülék alkalmazása

Active³
Erection System

Medintim




Apply lubricant

Használjon sikosító anyagot a peremen.

Active³
Erection System

Medintim

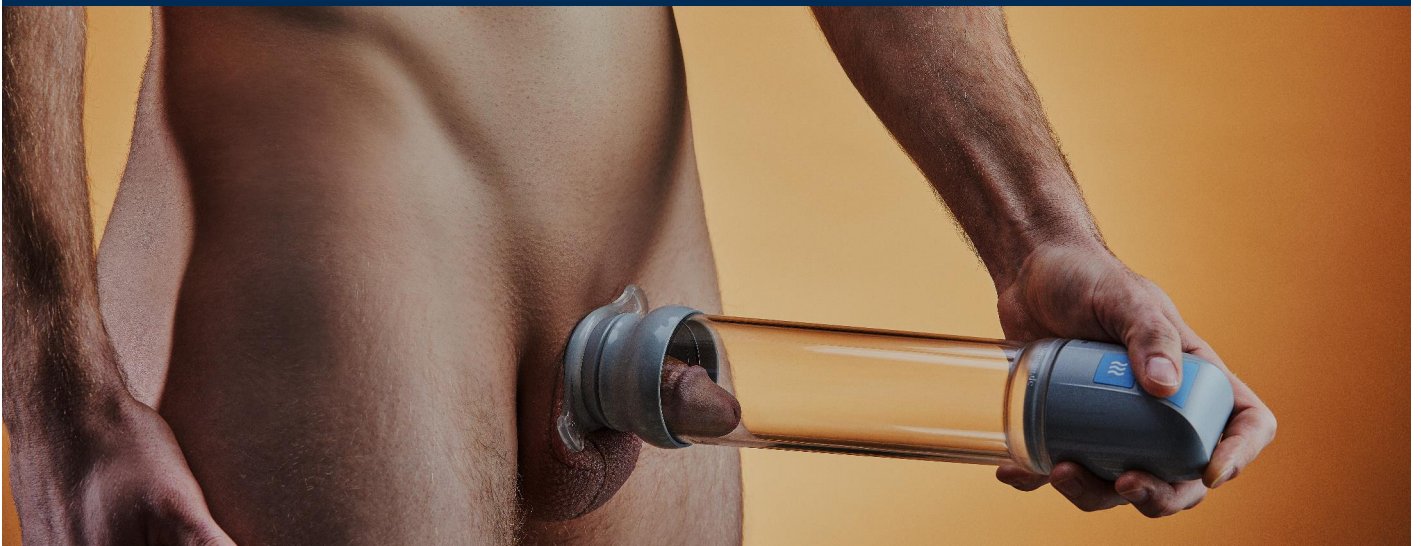


Press towards the body and start to pump

A péniszt helyezze a csőbe és nyomja a bőréhez (Ha nem nyomja oda, nem keletkezik vákuum)

Active³
Erection System

Medintim

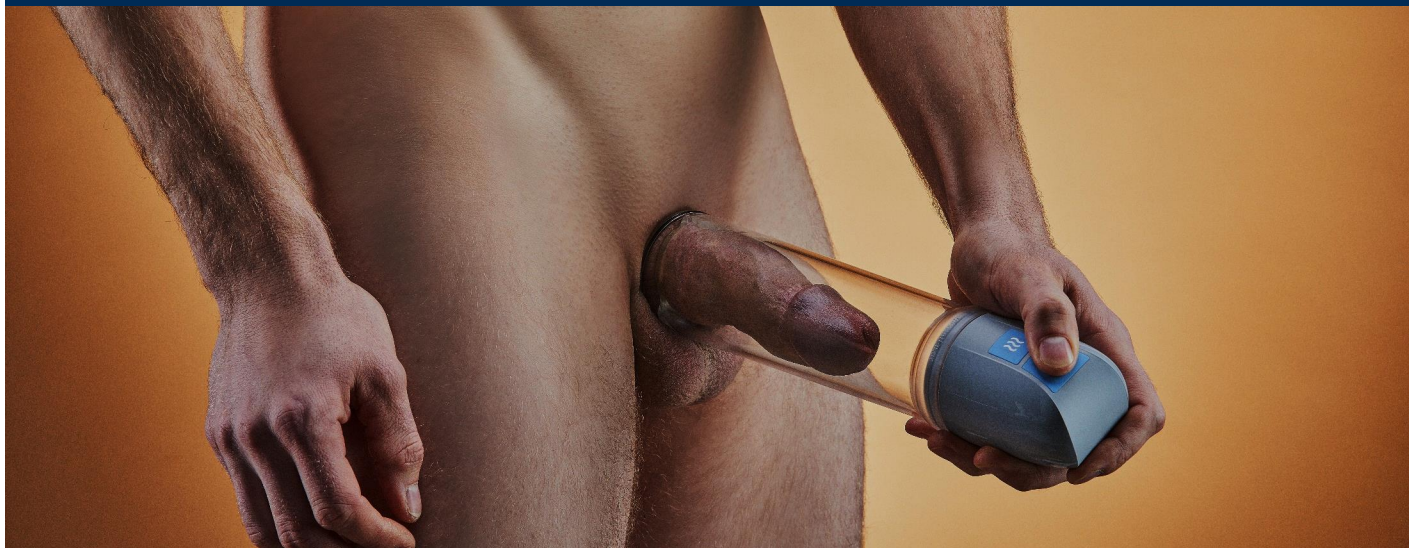


Vacuum in the cylinder creates an erection

A gomb megnyomva tartásával a pumpa vákuumot csinálj. Ha elengedi, leáll a szívás. Tartsa a gombot nyomva amíg a megfelelő erekciót eléri. (Általában 60-90 másodperc.)

Active³
Erection System

Medintim

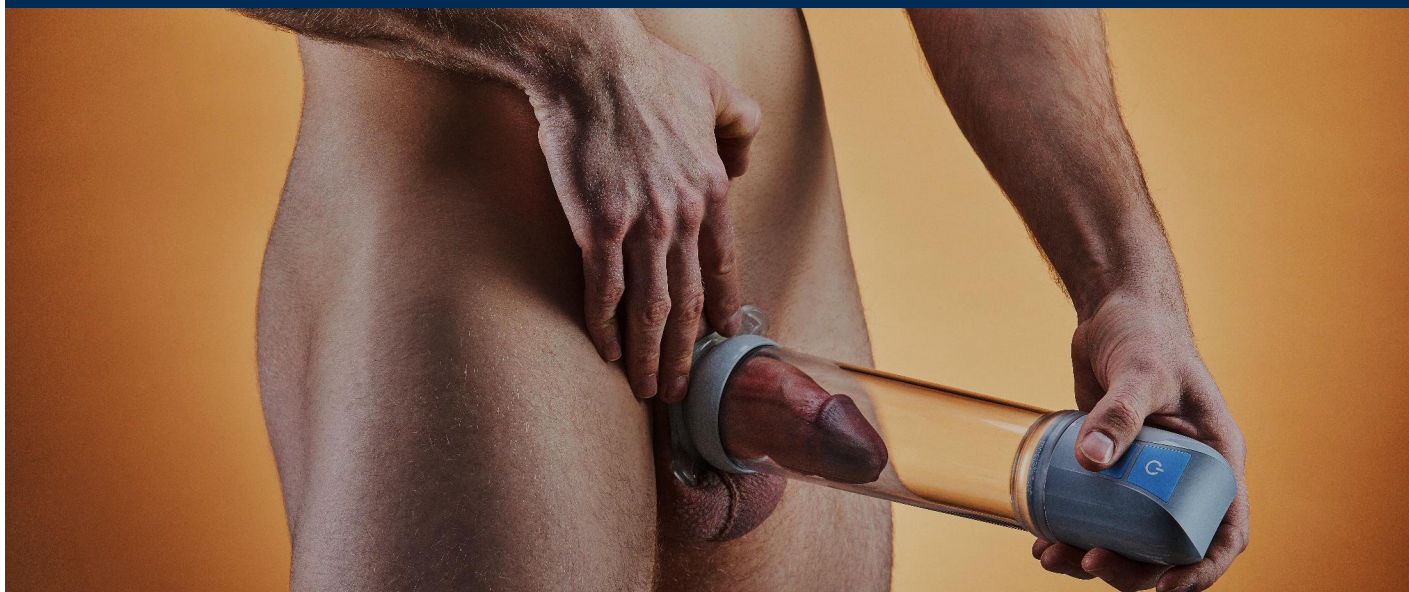

Now slide the constriction ring on the penis

A gumigyűrűt csúsztassa a pénisz tövére, hogy megakadályozza a vér távozását a péniszből.



Erection maintained with the ring (max. 30 Min.)

A merevedést a gyűrű tartja fenn. Maximum 30 percig hagyhatja fenn.



Afterwards: extend and remove the constriction ring

Aktust követően húzza szét a gumigyűrűt és távolítsa el a péniszéről.

Active³
Erection System

Medintim



After application

A leszorítás megszűnése után a pénisz elernyed.

Active³
Erection System

Medintim

Manufacturer:
KESSEL medintim GmbH

Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel. 0049 6105203720
www.medintim.de