



ELECTRODE CARE

THE DO'S AND DON'TS FOR PRODUCT LONGEVITY

ODAFIGYELÉSSSEL AZ ELEKTRÓDÁK JOBBAN TELJESÍTENEK ÉS TOVÁBB TARTANAK MAJD


Vegye figyelembe, hogy ha az elektródák elhasználódnak, új készletre kell cserélni őket.

Ez biztosítja, hogy minőségi kezelést végezzen. Emlékezzen: az elektródák eldobhatók.

AZ ALÁBBI ÚTMUTATÁSOK SEGÍTENEK ABBAN, HOGY MINÉL JOBBAN KIHASZNÁLJA AZ ELEKTRÓDÁIT.




A bőrnek tisztának, száraznak és krémektől mentesnek kell lennie.

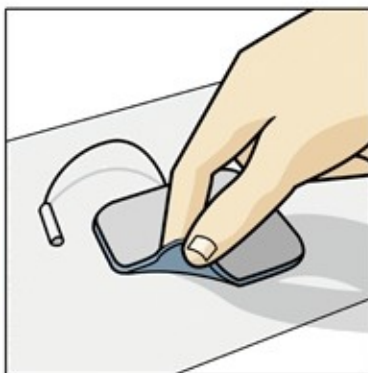

Az elektródát a pereménél fogva válassza le!



Csatlakoztatáskor, széthúzáskor fogja a csatlakozót!

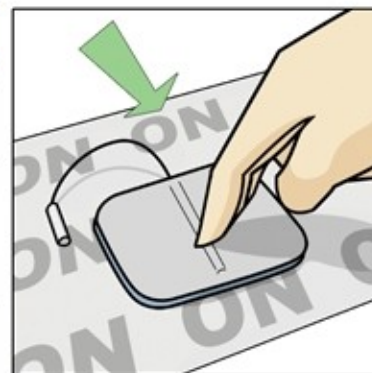

Kezelés után ragassza vissza a műanyag lap "ON" feliratú oldalára.




Ne merítse az elektródát vízbe!



Az elektródát NE a kábelnél fogva válassza le!



Ne a kábelnél fogva húzza szét a csatlakozót!

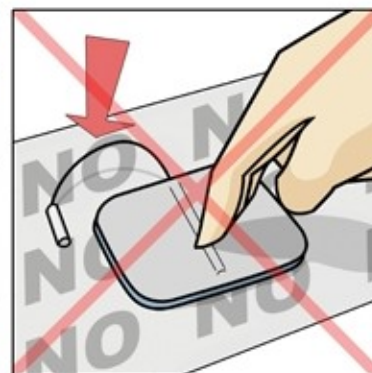

NE a "NO" feliratú oldalra ragassza vissza!

További tippek

- ° Az elektródákat egy betegnél történő használatra szánják.
- ° A megfelelő elektródamérethez tekintse meg a stimulátor kézikönyvét.
- Ha az elektróda gélje kiszárad, hidratálja újra vízcseppekkel.
- Ha nem használják, mindig zárja vissza az elektródákat az eredeti csomagolásukba, és szobahőmérsékleten tárolja őket.
- A meleg és hideg idővel az elektróda géljének lebomlását okozza.
- Érzékeny bőr esetén fontolja meg a PALS BLUE elektródák használatát.

AxelGaard neurostimulációs elektródák használati útmutatója

Elektróda típusok: PALS, UltraStim, ValueTrode Cloth és X Cloth.

Csatlakozó típusok: PIN (tűcsatlakozó), SNAP (patentcsatlakozó)

Alak: kerek, ovális, négyszög, téglalap, pillangó, egyéb

Méretek: 2.5 és 3.2cm, 7.5.x13cm, 5x5cm, 5x9cm, 5x10cm, egyéb

Alkalmazásra, működtetésre és eltávolításra vonatkozó utasítások:

1. A bőr mindig legyen tiszta, száraz és krémektől mentes.
2. Ne használja sérült bőrfelületen.
3. Csatlakoztassa az elvezetéseket az elektródákhoz.
4. Távolítsa el a védőlapot az elektródáról. Őrizze meg a védőlapot.
5. Szorosan rögzítse az elektródát a bőrre. Illessze fel először az elektróda közepét, majd simítsa le a széléit.
6. Csatlakoztassa az elvezetéseket a készülékhez. Kapcsolja be a stimulátort és állítsa be a készülék kezelésre vonatkozó instrukciói szerint. Ne lépje túl a 0,1 W/cm²-es intenzitást.
7. A stimulációs kezelés végeztével kapcsolja KI (OFF) a készüléket.
8. Az elektróda eltávolításához a szélénél fogva emelje fel és húzza le a bőrről.

Az elektróda gondozására és tárolására vonatkozó utasítások:

9. Helyezze vissza a félretett védőlapot az elektródára. Győződjön meg arról, hogy az ON oldal az elektróda géles felszíne felé néz.
10. Válassza le a kábelről az elektróda elvezetésének csatlakozóit.
11. Helyezze vissza az elektródákat az eredeti csomagolásukba.
12. Ha az elektródák kezdik elveszíteni tapadókéességüket, a géles felületbe óvatosan dörzsölt egy-két csepp víz segíthet meghosszabbítani a használhatóságukat. Amennyiben ez nem segít, cserélje le az elektródákat újakra.

Figyelem! A bőrhöz nem elég szorosan tapadó elektródák nagy mértékben növelik az égési sérülések és egyéb mellékhatások esélyét.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

⚠ Minden vonatkozó veszély, ellenjavallat, figyelmeztetés, óvintézkedés és mellékhatás tekintetében olvassa el a stimulátor készülék használati útmutatóját.

- Tartsa az elektródákat gyermekektől elzárva.
- Az elektródák kizárólag egy emberen használhatók.
- NE a vezeték meghúzásával távolítsa el az elektródát.
- NE használjon olyan elektródákat, amelyek nem megfelelő méretűek vagy alakúak a készüléke számára, vagy amelyek rosszul lettek felhelyezve. Ez bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Az elektródák nem érhetnek össze a kezelés közben.
- NE használja sérült bőrfelületen. Amennyiben bőrkiütést vagy égési sérülést tapasztal, azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és keresse fel kezelőorvosát.
- NE lépje túl a 0,1 W/cm²-es intenzitást.
- NE használja az elektródákat a fej és a szív területén, illetve a nyak elülső részén.
- NE alkalmazzon stimulációt vezetés vagy gépkezelés közben.

MEGJEGYZÉS: Az elektródák élettartama függ a bőr állapotától és előkészítésétől, az ingerlés típusától, a tárolási és légköri viszonyoktól.

Használat előtt, kérjük, olvassa el a készüléke használati útmutatóját is.